

# INSTRUCTIONS IGENITY® POUR ÉCHANTILLONS DE POILS



VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT LES INSTRUCTIONS DE LA TROUSSE AVANT D'EFFECTUER LE TEST.

Appelez le 855.324.9774 pour commander, ou visitez [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)



Tirez (ne coupez pas) le poil à partir du toupillon et non à partir de l'attache de la queue. Tirez le poil dans la direction opposée de laquelle il se trouve. Cela se traduit par moins de cassures, que de tirer directement de la queue.



Assurez-vous que la queue soit exempte de matières fécales et de terre.



Les racines doivent être clairement visibles. Environ 30 racines de poils sont requises. Pour des animaux avec des poils plus fins, un minimum de 50 à 60 poils est requis. Pour les animaux de moins de trois mois, un échantillon de sang est requis, puisque les racines de poils ne seront probablement pas visibles.



Ouvrez la carte de collection et retirez le couvercle en plastique. Insérez la racine des poils au centre de la carte de collection. Scellez le couvercle en plastique sur les poils et fermez la languette de la carte de collection.



Coupez l'excès de poils qui sort de la carte de collection. Inscrivez l'ID de l'animal et autre information dans les espaces prévus.



Enregistrez correctement l'ID de l'animal sur les cartes de collection et inscrivez correctement cette information sur votre formulaire de commande, pour vous assurer de jumeler le bon ADN au bon animal.

